







提供专业的产科剖宫产技能 培训解决方案

产品型号: 1022567

目录

重要信息	3
产品介绍	4
技能目标	4
配置清单	4
包装和组装	5
使用说明	
准备模型	5
将胎儿和胎盘放入子宫	
安装腹部皮肤	
模型修补	
保养与维护	
替换部件	9
联系方式	9







重要信息

一般告知

警告: 润滑不良的子宫可能会在操作过程中损坏模型。

仅可使用本产品随附的润滑剂和模拟血液。使用非推 荐的液体产品可能会削弱模型的功能或损坏模型。

润滑是使用本产品的关键;如果润滑不足,可能会导致硅胶部件撕裂或其他损坏。在使用本产品之前,请在子宫件上至少涂抹2-3次润滑剂。

在每次训练结束之后,请用温湿的布清洗掉所有润滑剂,这一点至关重要。您也可以使用婴儿湿巾擦去多余的润滑剂。

警告: 尖锐物体、过度用力或使用非 OEI 产品可能会 刮伤、磨损或损坏模型。

操作时应始终穿戴手套,并应取下所有首饰。尖锐的表面,如指甲和戒指,有时会导致硅胶部件的损坏。

保修信息

保修条款。除本文另有规定外,Operative Experience, Inc. (以下简称"Operative Experience")产品仅提供下方描述的1年有限保修期。第三方产品明确排除在以下有限保修范围之外,并且仅适用此类产品的第三方制造商所提供的保修条款(如有)。Operative Experience 特此明确否认所有明示或暗示的保证,包括但不限于对适销性、适合特定用途、不侵权的默示保证,以及因交易过程、履行过程或商业惯例而产生的任何保证,法律禁止或本文另有规定的除外。Operative Experience 人员、供应商和被许可方无权更改此类保证。

Operative Experience 保证其产品("产品")在首个终端用户第一次购买之日起的一(1)年内,不会出现材料和工艺方面的缺陷(但需受下列具体限制及条件所限)("保修期")。过了保修期后提出的缺陷索赔不在本有限保修范围之内。如需根据本有限保修条款提出索赔,买方必须通过电子邮件通知 Operative Experience(info@operativeexperience.com),并在对缺陷进行合理描述。如果 Operative Experience 确定此类缺陷包含在有限保修范围内,则 Operative Experience 将向买方发出退货授权书("RMA"),买方应根据 Operative Experience 提供的指示将相关产品退回到 Operative Experience。如果 Operative Experience 根据其合理的判断,确定产品在材料或工艺方面存在缺陷,则 Operative Experience 应自行选择修理或更换缺陷产品,买方无需承担任何费用。如果在修理或更换时没有相同的材料,则 Operative Experience 可自行选择替换成同等质量的材料或退款给买方。本产品仅供医疗培训使用,本有限保修范围不包括用于商业或其他非医疗培训目的的任何产品。买方对产品的任何更改均会致使本有限保修对更改后的产品无效。本有限保修条款仅适用于原始买方,不包括因以下原因而导致的缺陷或损坏:(i)意外、误用、滥用、篡改、疏忽、异常的物理压力、改动,或对产品的不当操作或处理(ii)对产品的维护、清洁或保养不正确或不充分;或(iii)产品的正常磨损。在本有限保修期内,由于非 Operative Experience 提供的任何辅助设备(附加在产品上或与产品一起使用)而导致的任何缺陷或损坏,Operative Experience 概不负责,并且所有此类设备明确排除在本有限保修范围之外。本有限保修条款不适用于易损件,例如电池,或买方可能与产品一同使用或购买的任何第三方产品。

产品介绍

剖宫产手术训练模型的设计目的是通过 腹壁、肌肉、筋膜、腹白线、子宫和羊膜囊与胎儿、胎盘和模拟羊水 进行全面的横向或纵向的剖宫产手术训练。

培训目标

- ■可以打开或闭合的腹壁和子宫
- ■培训助产器械的应用

- ■胎盘分娩
- ■团队协作执行剖宫产手术

配置清单

1	剖宫产躯干模型 部件编号: OB-300-2000	数量:1	5	子宫粘合剂 部件编号: OB-050-0998	数量:1
2	剖宫产子宫 部件编号: OB-300-2200	数量:2	6	润滑剂,16oz/473ml 瓶 部件编号:220007	数量:1
3	腹部皮肤 部件编号: OB-300-2300	数量:5	7	羊膜囊袋, 带塑封条 部件编号: OB-400-0999	数量:100
4	双胞胎婴儿 部件编号: OB-050-2925	数量:2	8	安装工具套 部件编号: OB-300-2400	数量:1



包装和组装

注意: 打开包装时请注意不要损坏包装箱, 此包装箱 是专门设计用于存储该产品的。

产品装在特别设计的纸箱内,箱的内盖贴附符合模型轮廓的海绵,用于存放所有配件。因此建议您保留所有原始运输包装。

首次打开包装时请小心切割包装材料,以免损伤包装 和产品。

建议将预留 60 cm x 183 cm 的空间存放纸箱。将所有配件放入箱中,并贴附清单。

使用说明 ——

准备模型

开始操作前,请充分润滑模型内壁 请使用提供的润滑剂,充分润滑所有可触摸部位





将胎盘和胎儿放进子宫

放置婴儿和胎盘

使用润滑剂润滑婴儿和子宫



使用提供的羊膜囊袋放置婴儿和胎盘,置于想要模拟的位置。



当婴儿和胎盘放入羊膜囊后,添加一半的水来模拟羊水。



小心加压羊膜囊袋,尽可能的排除空气,然后使用提供的塑封条扎紧。



润滑子宫内壁和羊膜囊表面,将羊膜囊袋放入子宫内。



将子宫整体放入盆腔内。



用子宫固定架定子宫,将杆子插入子宫的导孔中。




当子宫固定架安装好,将子宫与固定架一同插入模型 骨盆腔内,使固定架的螺丝孔与模型上的螺丝孔对齐。





使用提供的螺丝刀和螺丝,将螺丝拧紧,固定子宫固定架。切不可过紧。


安装腹部皮肤

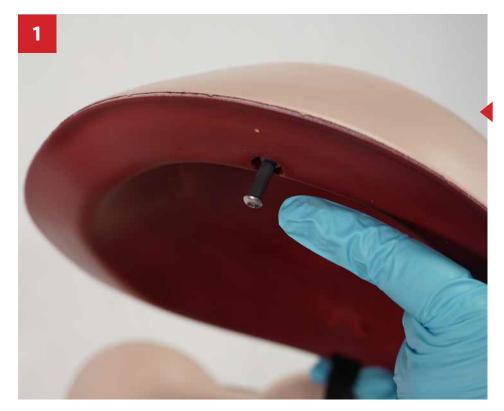



将腹部皮肤保持一个角度,使钢针 能够插入子宫固定架的凹槽内。然 后将腹部皮肤与躯干模型边缘对齐。

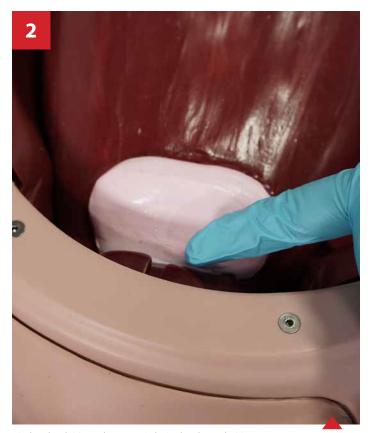

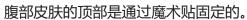

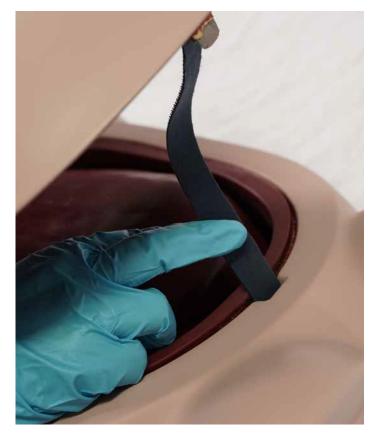

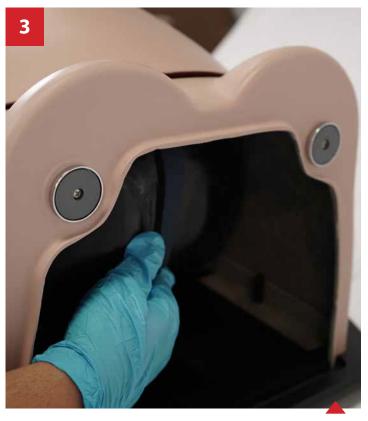

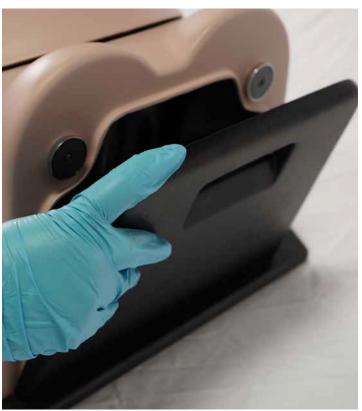

将腹部皮肤置于模型上方,将腹部皮肤上的魔术贴通过模型顶部的孔穿入。将腹部皮肤延伸出来的魔术贴粘贴在 躯干模型的背侧。

模型修补

修补子宫

所需材料

- 纸巾压舌板
- 丙酮
- 子宫粘合剂大头针

使用子宫粘合剂修复切开的伤口

- 1. 使用干纸巾将子宫表面的润滑剂尽可能的清洁干净。
- 2. 使用丙酮擦拭需要修补的区域,使模型彻底干燥。
- 3. 使用压舌板在子宫切面上均匀的涂抹子宫粘合剂。
- 4. 小心地将切口边缘对齐粘贴,并用大头针进行辅助固定,使其在最佳位置。
- 5.使用吹风筒或热烘枪使粘合剂干燥,约5-25分钟。
- 6. 取下针线。此时,子宫修补完毕。

修补脐带

所需材料

- 纸巾压舌板
 - 内酮
- ·子宫粘合剂 ·大头针

使用子宫粘合剂修复断开的脐带

- 1. 使用干纸巾将脐带表面的润滑剂尽可能的清洁 干净。
- 2. 使用丙酮擦拭需要修补的区域, 使模型彻底干燥。
- 3. 使用压舌板在脐带切面上均匀的涂抹子宫粘合剂。
- 4. 使用2-3个大头针将脐带切口辅助固定,使其在最 佳位置。
- 5. 使用吹风筒或热烘枪使粘合剂干燥,约5-25分钟。
- 6. 取下针线。此时,子宫修补完毕。

修补腹部皮肤

所需材料

纸巾压舌板

• 丙酮

子宫粘合剂针

使用子宫粘合剂修复切开的腹壁

- 1. 使用干纸巾将腹壁表面的润滑剂尽可能的清洁
- 2. 使用丙酮擦拭需要修补的区域, 使模型彻底干燥。

- 3. 使用压舌板在腹壁切面上均匀的涂抹子宫粘合剂。
- 4. 小心地将切口边缘对齐粘贴,并用大头针进行辅助固定,使其在最佳位置。
- 5.使用吹风筒或热烘枪使粘合剂干燥,约5-25分钟。
- 6. 取下针线。此时,子宫修补完毕。

保养与维护

表面

避免墨水笔、圆珠笔、丙酮、碘伏等有色或腐蚀溶剂沾染模型,以免造成永久污染和损坏。同时避免模型放置在报纸或有油墨的纸上。

润滑

应充分使用润滑剂润滑子宫和腹腔内壁。

存储

准备长期存放前,应将模型内的液体全部排空。所有可触摸的部分应彻底清洁干燥后进行储存。

清洁

模型表面可用清水或柔和的清洁剂清洁。模型躯干部分不得浸泡在水中,子宫及配件可用清水清晰,但不可浸泡在清洁剂中。模型在使用前应彻底排水干燥。

联系方式 -

替换部件

名称	部件编号
模型背板	OB-300-2005
子宫固定架	OB-300-2008
剖宫产子宫	OB-300-2200
腹部皮肤	OB-300-2300
双胞胎婴儿	OB-050-2926
安装工具套	OB-300-2400





A worldwide group of companies Suzhou 3B Scientific Co., Ltd.

苏州新区火炬路45号•科技工业园•215009 Tel: +86 512 68081123•Fax: +86 512 68258957

E-Mail: sales@3bscientific.cn