


C-Celia®

紧急子宫切除 训练模型

提供专业的产科剖宫产技能
培训解决方案

产品型号：1022564

目录

重要信息.....	3
产品介绍.....	4
技能目标.....	4
配置清单.....	4
包装和组装.....	5
使用说明.....	5
准备模型.....	5
安装子宫.....	5-6
安装腹部皮肤.....	7
填充模拟血液.....	8
保养与维护.....	9
替换部件.....	9
联系方式.....	9

重要信息

一般告知

警告: 润滑不良的子宫可能会在操作过程中损坏模型。

仅可使用本产品随附的润滑剂和模拟血液。使用非推荐的液体产品可能会削弱模型的功能或损坏模型。

润滑是使用本产品的关键；如果润滑不足，可能会导致硅胶部件撕裂或其他损坏。在使用本产品之前，请在子宫件上至少涂抹2-3次润滑剂。

在每次训练结束之后，请用温湿的布清洗掉所有润滑剂，这一点至关重要。您也可以使用婴儿湿巾擦去多余的润滑剂。

警告: 尖锐物体、过度用力或使用非 OEI 产品可能会刮伤、磨损或损坏模型。

操作时应始终穿戴手套，并应取下所有首饰。尖锐的表面，如指甲和戒指，有时会导致硅胶部件的损坏。

保修信息

保修条款。除本文另有规定外，3B Scientific GmbH (以下简称“3B Scientific”)产品仅提供下方描述的1年有限保修期。第三方产品明确排除在以下有限保修范围之外，并且仅适用此类产品的第三方制造商所提供的保修条款(如有)。3B Scientific 特此明确否认所有明示或暗示的保证，包括但不限于对适销性、适合特定用途、不侵权的默示保证，以及因交易过程、履行过程或商业惯例而产生的任何保证，法律禁止或本文另有规定的除外。3B Scientific 人员、供应商和被许可方无权更改此类保证。

3B Scientific 保证其产品(“产品”)在首个终端用户第一次购买之日起的(1)年内，不会出现材料和工艺方面的缺陷(但需受下列具体限制及条件所限)(“保修期”)。过了保修期后提出的缺陷索赔不在本有限保修范围之内。如需根据本有限保修条款提出索赔，买方必须通过电子邮件通知 3B Scientific (Sales@3bscientific.com)，并在对缺陷进行合理描述。如果 3B Scientific 确定此类缺陷包含在有限保修范围内，则 3B Scientific 将向买方发出退货授权书(“RMA”)，买方应根据 3B Scientific 提供的指示将相关产品退回到 3B Scientific。如果 3B Scientific 根据其合理的判断，确定产品在材料或工艺方面存在缺陷，则 3B Scientific 应自行选择修理或更换缺陷产品，买方无需承担任何费用。如果在修理或更换时没有相同的材料，则 3B Scientific 可自行选择替换成同等质量的材料或退款给买方。本产品仅供医疗培训使用，本有限保修范围不包括用于商业或其他非医疗培训目的的任何产品。买方对产品的任何更改均会致使本有限保修对更改后的产品无效。本有限保修条款仅适用于原始买方，不包括因以下原因而导致的缺陷或损坏:(i)意外、误用、滥用、篡改、疏忽、异常的物理压力、改动，或对产品的不当操作或处理(ii)对产品的维护、清洁或保养不正确或不充分；或(iii)产品的正常磨损。在本有限保修期内，由于非 3B Scientific 提供的任何辅助设备(附加在产品上或与产品一起使用)而导致的任何缺陷或损坏，3B Scientific 概不负责，并且所有此类设备明确排除在本有限保修范围之外。本有限保修条款不适用于易损件，例如电池，或买方可能与产品一同使用或购买的任何第三方产品。

产品介绍

紧急子宫切除训练模型是一个可开放的腹部模拟器，支持产后出血控制技术和子宫完全切除术。

培训目标

- 修复复杂的子宫裂伤和子宫动脉损伤
- 团队协作
- 执行子宫完全切除手术
- 产后出血管理

配置清单

1 子宫切除躯干模型 部件编号：OB- 200-2000	数量:1	5 润滑剂,16oz/473ml 瓶 部件编号：220006	数量:1
2 可切除的子宫 部件编号：OB-220-2201	数量:10	6 肠 部件编号：OB-050-0300	数量:1
3 开放的腹部皮肤 部件编号：OB-050-2500	数量:1	7 安装工具套 部件编号：OB-300-2400	数量:1
4 模拟血液 部件编号：OB-200-0700	数量:1	8 血液注射器 部件编号：OB-200-0750	数量:1



包装和组装

注意：打开包装时请注意不要损坏包装箱，此包装箱是专门设计用于存储该产品的。

产品装在特别设计的纸箱内，箱的内盖贴附符合模型轮廓的海绵，用于存放所有配件。因此建议您保留所有原始运输包装。

首次打开包装时请小心切割包装材料，以免损伤包装和产品。

建议将预留 60 cm x 183 cm 的空间存放纸箱。将所有配件放入箱中，并贴附清单。

使用说明

准备模型

开始操作前，请充分润滑模型内壁。
请使用提供的润滑剂，充分润滑所有可触摸部位。



安装子宫


常规润滑子宫




在安装前，请使用提供的润滑剂充分润滑子宫。




小心轻柔地将子宫推入骨盆中。确保子宫处于正确的位置。用子宫固定架定子宫，将杆子插入子宫的导孔中。

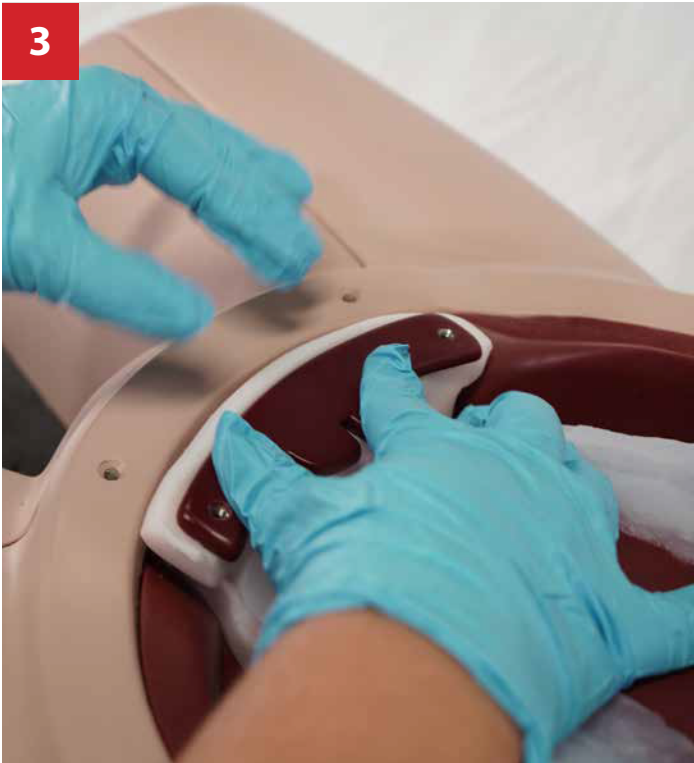


3 确保子宫固定架完全插入子宫导孔。

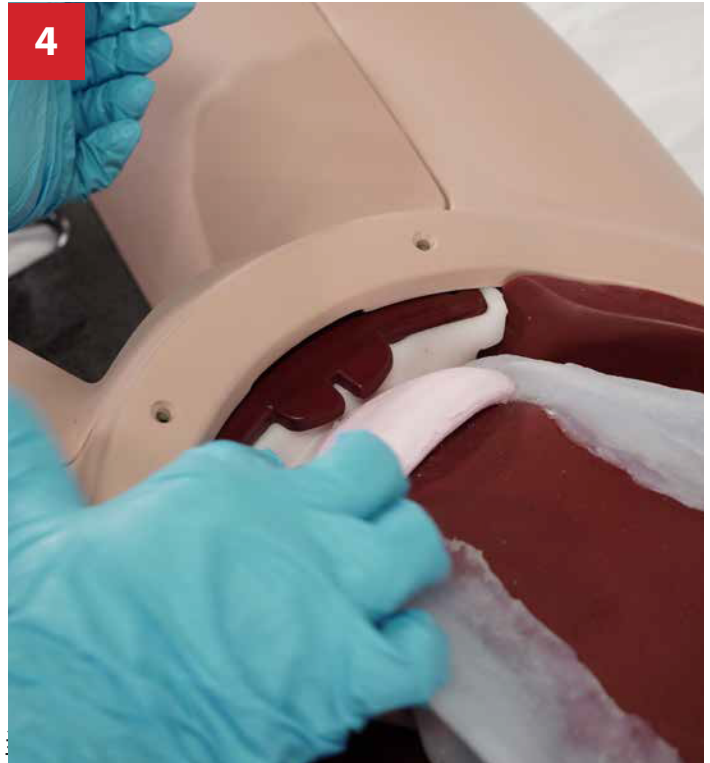

4 骨盆腔内，使固定架的螺丝孔与模型上的螺丝孔对齐。

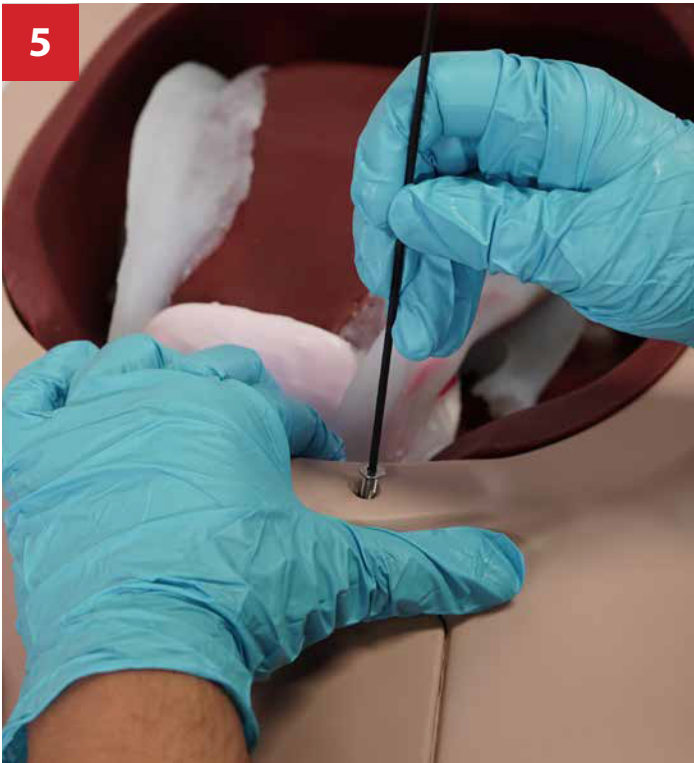

5 使用提供的螺丝刀和螺丝，将螺丝拧紧，固定子宫固定架。

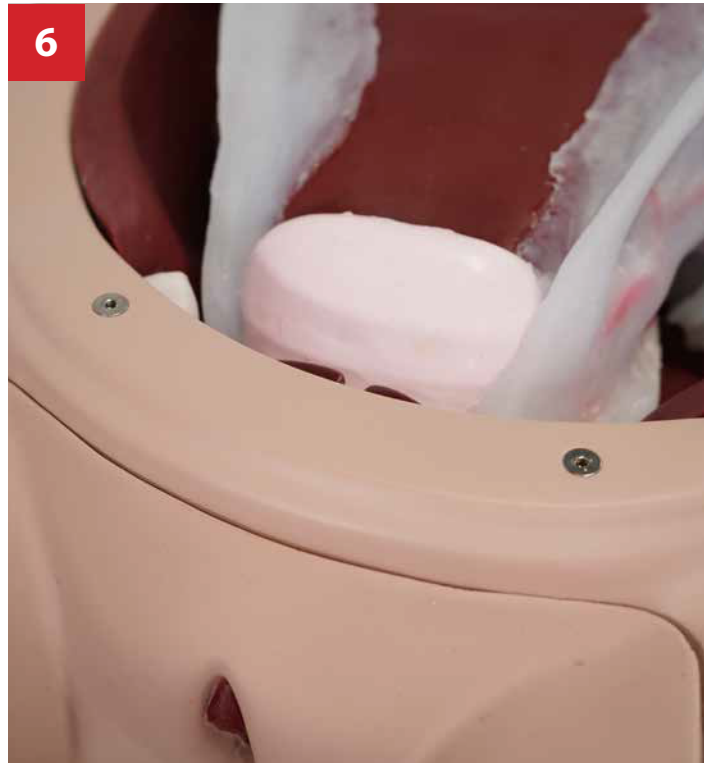


6 切不可过紧。

添加肠道和开放的腹部皮肤




1 润滑肠道，并放入腹腔中。

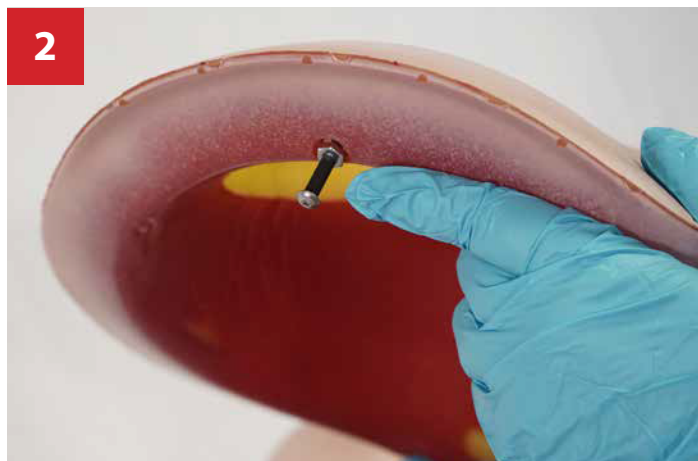

2 若要扣合腹部皮肤，首先要将腹部皮肤上的钢针插入子宫固定架内。



3 将腹部皮肤保持一个角度，使钢针能够插入子宫固定架的凹槽内。

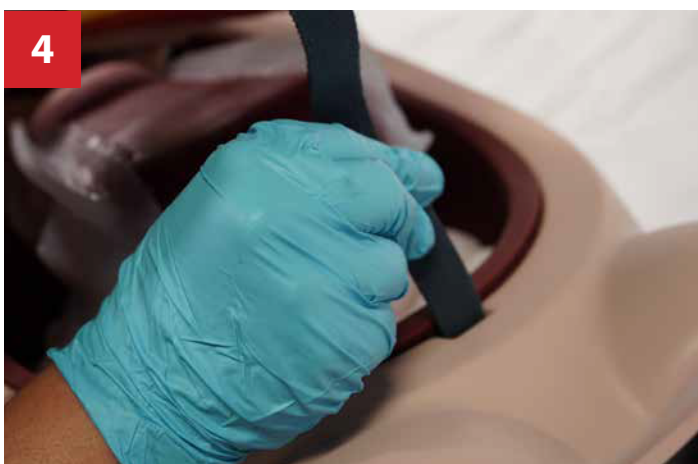

4 将腹部皮肤置于模型上方，将腹部皮肤上的魔术贴通过模型顶部的孔穿入。



5 将腹部皮肤延伸出来的魔术贴粘贴在躯干模型的背侧。



6 扣合模型背板。

填充模拟血液



使用注射器抽取血液，在子宫的上1/3处注入，重复8-10次即可。



按摩子宫，使血液均匀分布。

保养与维护

表面

避免墨水笔、圆珠笔、丙酮、碘伏等有色或腐蚀溶剂沾染模型，以免造成永久污染和损坏。同时避免模型放置在报纸或有油墨的纸上。

润滑

应充分使用润滑剂润滑子宫和腹腔内壁。

存储

准备长期存放前，应将模型内的液体全部排空。所有可触摸的部分应彻底清洁干燥后进行储存。

清洁

模型表面可用清水或柔和的清洁剂清洁。模型躯干部分不得浸泡在水中，子宫及配件可用清水清洗，但不可浸泡在清洁剂中。模型在使用前应彻底排水干燥。

替换部件

名称	部件编号
模型背板	OB-100-2005
子宫固定架	OB-300-2008
可切除的子宫	OB-200-2201
开放的腹部皮肤	OB-050-2500
润滑剂	220006
安装工具套	OB-300-2400

联系方式



3B Scientific

A worldwide group of companies



Suzhou 3B Scientific Co., Ltd.

苏州新区火炬路45号·科技工业园·215009

Tel: +86 512 68081123 • Fax: +86 512 68258957

E-Mail: sales@3bscientific.cn