



1019698 | P15

3bscientific.com

褥疮护理训练模型

褥疮护理训练模型

产品概述

感谢您购买这款褥疮护理训练模型，模型表现了不同阶段的褥疮，共有5处创面。借助该模型，护理和医科专业的学生可以学习在不同褥疮阶段进行专业评估（检查、测量和描述）、伤口护理和绷带包扎技术训练。此类训练可以大大提高对真实患者进行褥疮鉴别和护理的水准。


功能

模型表现的褥疮创面，经验证符合临床真实褥疮发展阶段，可以用于临床褥疮护理实践操作。

- 一期褥疮（右侧大转子）
- 二期褥疮（臀部 - 右侧）
- 三期褥疮（臀部 - 左侧）
- 四期褥疮（左侧大转子、骶骨）

交货内容


褥疮护理训练模型
手提包

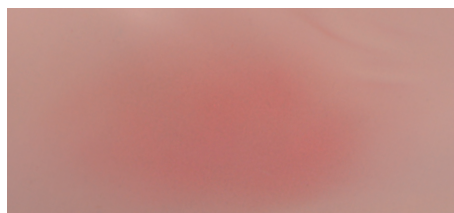

一期褥疮

右侧大转子

模拟表现：皮肤红肿但完整。

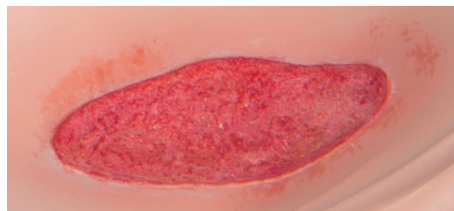


二期褥疮

右侧臀部

模拟表现：外层皮肤（表皮）具有损伤的迹象，一直延伸到真皮层部分。伴有水泡和皮肤擦伤，可以显示出表面压伤。


褥疮护理训练模型

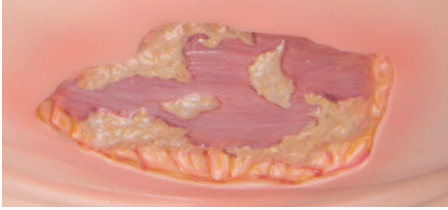

三期褥疮

左侧臀部


模拟表现：全层皮肤缺失，皮下组织损伤，甚至坏死。可以通过黑色创面进行辨认。

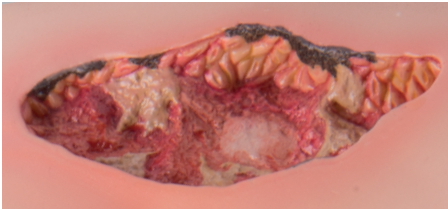

四期褥疮

左侧大转子、骶骨

模拟表现：所有皮肤层和肌肉筋膜受损。坏死区被标记为黑色。该层下面的肌肉和骨头区域也受到影响。该损伤会发展为坏死。肌腱、韧带或关节结构等支持性结构也可能受到影响。同时还可以看到有囊肿形成，或多或少有所扩展。

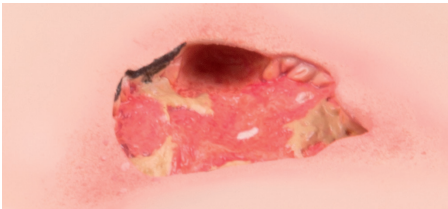

清洁和护理

使用湿布清洁模型表面，任何正常石膏剂、绷带等残留物均可清除。若长时间储存，必须清洁干净，待完全干燥后再放入手提袋内。

技术参数：

尺寸

模型（高 x 宽 x 深）： 15 x 34 x 38 cm

重量： 约2.2kg

操作条件

工作温度： -10°C to +40°C

储存温度： -10°C to +40°C



China 3B Scientific Co., Ltd.

苏州新区火炬路45号·科技工业园4号厂房·215009

Tel: +86 512 68081123 · Fax: +86 512 68258957

E-Mail: sales@3bscientific.cn

网址: www.3bscientific.com

© Copyright 2016 for instruction manual and design of
product: 3B Scientific GmbH, Germany