



1020628 | P94

GEBURTSSTADIEN TRAINER



Einleitung

Sie haben einen Geburtsstadien Trainer erworben, mit dem sich die fachgerechte Geburtsreifebestimmung demonstrieren und üben lässt. Der Trainer verfügt über 6 Einsätze, die ertastet und entsprechend mit den Auszubildenden besprochen werden können. Hierbei können Standards im Rahmen einer fachgerechten Geburtsvorbereitung in der Ausbildung und im klinischen Alltag trainiert und somit verbessert werden.

Lieferumfang

6 Einsätze Sicherungsplatte mit 4 Schrauben (für den Einsatz im Geburtssimulator P90) Gleitmittel Transporttasche



Funktionen

Das Set besteht aus 6 verschiedenen Geschlechtseinsätzen, welche die Zustände der cervikalen Dilatation und Verstreichung darstellen. Die Einsätze können sowohl als alleinstehende Trainer, als auch in Form einer modularen Erweiterung des <u>Geburtssimulators P90</u> genutzt werden. Die Einsätze sind von außen nicht zu unterscheiden und deuten lediglich durch eine Nummern-Codierung auf der Rückseite auf den unterschiedlichen Geburtsreifegrad des Muttermundes im Inneren hin.



Muttermund geschlossen (0,5 cm) Höhenstand -2



Muttermund 2 cm geöffnet, Höhenstand -2



Muttermund 3 cm geöffnet, halb verstrichen; Höhenstand -2







GEBURTSSTADIEN TRAINER



Montage

Einsetzen der Geburtsstadieneinsätze:

- Im Fall der Benutzung in Verbindung mit dem Geburtssimulator P90 (<u>Basic</u> und <u>PRO</u>), können die verschiedenen Einsätze (1–6) in den Grundkörper des Geburtssimulators eingesetzt werden. Stellen Sie den Geburtssimulator mit den Gummifüßen auf eine rutschfeste Unterlage, z. B. auf einen Tisch.
- Entfernen Sie die Bauchdecke.
- Entfernen Sie den Portioeinsatz und den Geburtskanal (PRO-Version).
- · Lösen und entfernen Sie 4 Schrauben.
- Befestigen Sie die Sicherungsplatte (Abb. 1) mit den 4 integrierten Schrauben (verbleiben an der Sicherungsplatte) (Abb. 2).

NUR Basic-Version:

- Trennen Sie den hinteren Phantomverschluss (Verbindung zu den weißen Pins) von der Bauchdecke ab (dieser kann weiterhin als Abdeckung im Normalbetrieb genutzt werden um zu verhindern, dass Gleitgel in die Vertiefung läuft) (Abb. 3).
- Entfernen Sie den Vulvaeinsatz aus der Bauchdecke.
- Befestigen Sie die Bauchdecke (nur im Bereich des Steißbein) (Abb. 4).
- Führen Sie den gewünschten Geburtsstadieneinsatz von unten in das Becken ein (Abb. 5).
- Stellen Sie sicher, dass der Einsatz über den Phantomverschluss in dem Grundkörper eingerastet ist.
- Schließen Sie die Bauchdecke vollständig (Abb. 6).



Abb. 1







Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4





Abb. 5 Abb. 6

GEBURTSSTADIEN TRAINER



Reinigung und Pflege

Die Oberflächen des Trainers können mit einem feuchten Tuch gereinigt, oder unter laufendem Wasser abgespült werden. Bitte darauf achten, dass alle Teile vor dem Verstauen vollständig trocken sind.



TIPP

Reste des aufgetragenen Gleitmittels können bei erneuter zeitnaher Verwendung des Geburtsstadien Simulators an den entsprechenden Stellen verbleiben. In jedem Falle vor der Durchführung einer Untersuchung sicherstellen, dass ausreichend Gleitmittel vorhanden ist. Bei längerem Nichtgebrauch alle Teile vor dem Verstauen reinigen.

Technische Daten

Abmessungen:

Simulator (HxBxT): 13 x 11,5 x 13 cm Tasche (HxBxT): 25 x 60 x 23 cm

Gewicht: ca. 5,6 kg (inkl. Transporttasche; 4,85 kg ohne Transporttasche)

Betriebsbedingungen:

Betriebstemperatur: -10° C bis +60°C Lagertemperatur: -20° C bis +60°C

Bestellliste Verbrauchsmaterial:

1020608 / XP90-015 Gleitgel (2x250 ml)

Für die Geburtshilfe-Ausbildung ebenfalls empfohlen:

1020332 | P90B Geburtssimulator BASIC 1020333 | P90P Geburtssimulator PRO



3B Scientific GmbH • Customer Service Medical Rudorffweg 8 • 21031 Hamburg • Germany Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100 3bscientific.com • info@3bscientific.com

© Copyright 2016 for instruction manual and design of product: 3B Scientific GmbH, Germany