



Módulo de treinamento de sutura de episiotomia P96

MÓDULO DE TREINAMENTO DE SUTURA DE EPISIOTOMIA P96

> INTRODUÇÃO

Você comprou o Módulo de Treinamento de Sutura e Episiotomia P96 que atualizará seu Simulador de parto P90 PRO ou BASIC (1020333 -1020332) com sutura de episiotomia pós-parto realista e inserções de treino de habilidades de reparo. A pele macia suporta suturas reais e permitirá que o aluno obtenha experiência no manuseio do instrumento, assim como técnicas de sutura e amarração de pontos.



> CONTEÚDO FORNECIDO

- 1 módulo base
- 2 inserções de sutura de episiotomia, pré-corte
- 1 inserção de sutura de episiotomia, sem corte
- Placa de segurança com 4 parafusos (para a inserção opcional no Simulador de parto P90)

> RECURSOS

- Compatível com Simulador de parto P90 PRO e Basic
- Fácil instalação das diferentes inserções e do módulo no Simulador de parto P90
- Duas inserções com episiotomia medial e episiotomia médio-lateral com lacerações no lábio menor
- Uma inserção não tem cortes e permite o aluno escolher o local da episiotomia que deseja treinar
- Pele macia realista
- Permite o uso de instrumento real de sutura
- Permite suturas reais
- Pele reutilizável durável
- Fabricado com material sem látex

MÓDULO DE TREINAMENTO DE SUTURA DE EPISIOTOMIA P96

➤ MONTAGEM

- Se usado em conjunto com o Simulador de parto P90 (Basic e PRO), o módulo pode ser adicionado ao corpo do simulador de parto. Coloque o pé de borracha do simulador de parto em uma superfície não derrapante, como uma mesa.
- Remova toda a cobertura abdominal do Simulador de parto P90(Basic e PRO).
- Remova o cérvix e a inserção do canal de parto do simulador de parto P90 (apenas na versão PRO).
- Solte e remova os 4 parafusos indicados na Fig. 2 para colocar uma segunda vez a placa de segurança com os 4 parafusos integrados (que permanece na placa de segurança) (Fig. 1).
- Fixe a placa de segurança (Fig. 1) com os 4 parafusos integrados (que permanecem na placa de segurança) (Fig. 2).

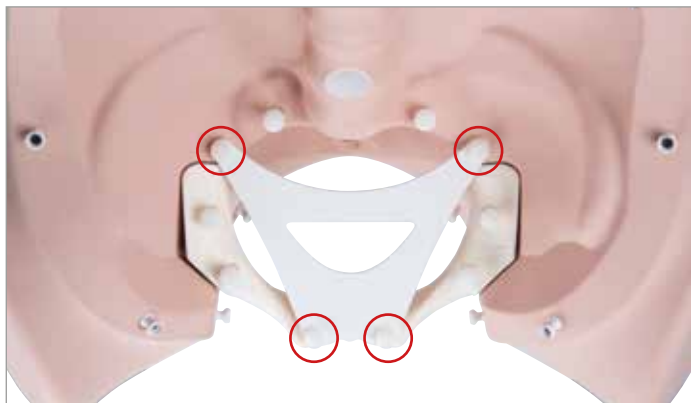


Fig. 2

➤ APENAS VERSÃO BÁSICA:

- Retire o fechamento traseiro do manequim (conectado com os pinos brancos) da cobertura abdominal (pode ser usado como uma cobertura no uso normal para impedir a entrada de lubrificante na abertura) (Fig. 3).
- Remova a inserção de vulva da cobertura abdominal.
- Fixe a cobertura abdominal (somente ao redor do cóccix) (Fig. 4).
- Insira o módulo de episiotomia por baixo até a pélvis.
- Certifique-se de que a inserção foi presa firmemente ao corpo básico via fechamento do manequim.
- Feche completamente a cobertura abdominal (Fig. 5).



Fig. 1



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

MÓDULO DE TREINAMENTO DE SUTURA DE EPISIOTOMIA P96

> LIMPEZA E CUIDADO

A superfície do treinador pode ser limpa com um pano umedecido ou enxaguada com água corrente. Certifique-se de que todas as partes estão completamente secas antes de guardar.

> DADOS TÉCNICOS

Dimensões:

Simulador (A x L x P): 14 x 24 x 18 cm

Peso: aprox. 1 kg

Condições operacionais:

Temperatura de operação: 0°C a +30°C

Temperatura de armazenamento: -10°C a +40°C

> CONTATO



3B Scientific

A worldwide group of companies

Brasil 3B Scientific Imp. E Exp. Ltda.



Rua Landmann, 92 B • Costa e Silva

CEP 89217-420 Joinville - SC • Brasil

Fone: +55 (0) 47 3464-1818 • Fax: +55 (0) 47 3467-9800

3bscientific.com • vendas@3bscientific.com

> LISTA DE PEDIDOS

Nº do item	Peças de reposição e de consumo
1022214	Conjunto de reposição do módulo de pré-corte de treinamento de sutura de episiotomia P96
	
1022215	Conjunto de reposição do módulo de treinamento de sutura de episiotomia P96
	

Nº do item	Também recomendado para treinamento de parteiras e pessoal obstétrico
1020332	Simulador de parto P90B BASIC
1020333	Simulador de parto P90P PRO
1020628	Treinador de estágios de parto

Todos os treinadores, simuladores e peças de reposição estão disponíveis em 3bscientific.com