



## 会阴切开术缝合训练模块

P96

# 会阴切开术缝合训练模块

## 前言

您购买的是一个会阴切开术缝合训练模块 P96，这是一组逼真的产后外阴切开术缝合以及修复技能训练模型，可以用来升级您现有的高仿真分娩训练模型 P90 专业版(P90P 1020333)或基础版(P90B 1020332)。柔软的皮肤能够进行真正的缝合操作，并能够提供真实的操作体验，包括触感、缝合、以及打结。



## 配置清单

- 1 个模块基座
- 2 个会阴切开术缝合插件，预切割
- 1 个会阴切开术缝合插件，未切割
- 带 4 个螺钉的固定板(可与高仿真分娩助产训练模型组合使用)

## 特色

- 与分娩助产训练模型 P90 专业版或基础版兼容；
- 在分娩模型中可轻松安装不同的插件和模块；
- 两个插件具有内侧会阴切开术和左(右)中侧外阴切开术切口，且小阴唇上有裂伤；
- 一个插件未切割，训练者员可自行创建其想要训练的切开术位置；
- 逼真的柔软肌肤；
- 使用真正的缝合器械；
- 真正的缝合操作；
- 皮肤可重复使用，经久耐用；
- 由不含乳胶的材料制成。

# 会阴切开术缝合训练模块

## ▶ 组装

- 如果与高仿真分娩助产训练模型 P90(基础版和专业版)组合使用, 可将模块放入模型主体中。将分娩模型放置在防滑表面(如桌子)上。
- 取下分娩模型 P90(基础版和专业版)的整个腹部皮肤。
- 取下分娩模型 P90 的子宫颈和产道插件(专业版需要取出)。
- 松开并取下图 2 中所示的 4 个螺钉, 如图所示放置固定板并扭紧螺钉(图 1)。
- 用 4 个螺钉固定住固定板(图 1)。



图 2



图 1

## ▶ 仅适用于基础版

- 将腹部皮肤末端连接模型尾骨部分的皮肤拆下, 此处用于固定腹部皮肤末端, 并且防止润滑剂进入凹槽内。(图 3)
- 如图 3 所示剪掉其中一个连接头。
- 将剩余的连接头重新安装。(图 4)
- 将会阴切开缝合训练模块从下方插入骨盆内。
- 确保通过模块上的固定插件和固定板使模块牢牢地安装在分娩模型上。
- 最后将腹部皮肤重新安装。

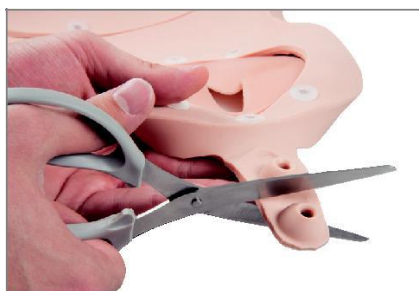


图 3

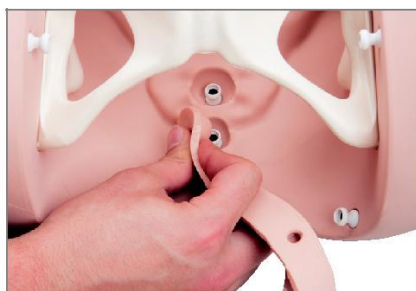


图 4



图 5

# 会阴切开术缝合训练模块

## 清洁和护理

使用湿布擦洗训练模型的表面，或在流水下冲洗。在储存前，请确保所有模块完全干燥。

## 技术数据

尺寸:

模拟模型 (高 x 宽 x 厚): 14 x 24 x 18 cm



重量: 约 1 kg

## 运行条件:

运行温度: 0°C 至 +30°C

储存温度: -10°C 至 +40°C

## 选购清单

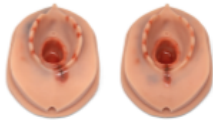产品型号	替换件和耗材
1022214	外阴切开缝合训练模块替换件(已做切口) 
1022215	外阴切开缝合训练模块替换件(未做切口) 

产品型号	推荐一下产品用于完整的产科技能培训
1020332	高仿真分娩助产训练模型 P90B
1020333	高仿真分娩助产训练模型 P90P
1020628	分娩阶段评估训练模型

所有训练模型和替换件均可登录官方网站 [3bscientific.com](http://3bscientific.com) 查看。



**3B Scientific**  
A worldwide group of companies



Suzhou 3B Scientific Co., Ltd.  
苏州新区火炬路45号·科技工业园·215009  
Tel: +86 512 68081123 • Fax: +86 512 68258957  
E-Mail: [sales@3bscientific.cn](mailto:sales@3bscientific.cn)