

灌肠训练模型使用指南

W44094 LF00957U



灌肠训练模型使用指南

产品清单：

- 1 灌肠袋
- 1 乳胶手套
- 1 润滑剂
- 1 水管
- 1 手提箱

模型安装：

- 1. 建议使用清水或蒸馏水进行灌肠操作；
- 2. 将灌肠袋挂在高于模型位置即可；
- 3. 在进行灌肠插管前，必须使用指定润滑剂润滑肛管，润滑剂不可使用过多，以免堵塞肛管。
- 4. 模型使用完毕，必须将排水管安装在模型顶部，如图所示，将模型内的液体排净才可储存。



维护与保养：

- 1. 可以使用肥皂水或温水清洁模型表面，顽固污渍可以使用模型专属清洁剂(LF09919U)去除；
- 2. 使用干布或纸巾将模型擦拭干净，模型内液体全部排空，拆除排水管，待完全干燥后放入手提箱内储存。

注意事项：

- 1. 不可以使用具有腐蚀性或溶解性的清洁剂清洗，会造成模型永久性损坏；
- 2. 不可使用带有油墨的印刷材料包裹模型，会造成污染；
- 3. 不可使用圆珠笔进行标记，会留下永久性痕迹。

配件：

LF09919U	模型清洁剂
LF01050U	模型润滑剂
LF01024U	18"排水管
LF01098U	灌肠袋