

妇科宫腔镜和腹腔镜训练模拟器

产品型号：W45103



产品概述

- 成人尺寸的女性下半身
- 可移动的柔软皮肤
- 用于放置内窥镜的无缝宫颈、灵活的皮肤
- 7个可互换子宫，包括内部和外部表现：健康正常、子宫内膜息肉、子宫肌瘤、早期和晚期子宫内膜癌、脱垂肌瘤扭转、基底癌
- 可模拟双合诊检查，触诊正常和异常子宫
- 包含搬运箱

使用指导：

- 外部皮肤可拆开
- 模型皮肤下是橡胶的，模拟真实骨盆壁的触感。
- 模型上部有一个半圆的“窗口”，从这个“窗口”可以放电筒到腹部去观察子宫、卵巢、输卵管、圆韧带、其他骨盆内解剖结构。操作者也可以改变子宫的位置、取下和重新安放子宫从这个小“窗口”。

子宫组件

非妊娠的子宫前倾有一个透明的顶部和不透明的下部。子宫由圆韧带悬挂在模型内，附在骨盆壁。韧带、输卵管、卵巢是可以拆卸的。子宫也可以顺时针和逆时针扭转。

模型运到是有一个正常的前倾子宫和正常的宫颈。

阴道

用阴道镜检查，可以如下操作：

用普通的检查镜

用水溶性的润滑油润滑阴道镜。

为了观察宫颈，可以将阴道镜全部放入，摆好位置，打开两边片。

为了打开范围大一些，可以用拇指螺丝

宫颈

正常宫颈有一个椭圆孔，可以装上子宫，并且安放和取出节育环。异常的则没有。操作时，最常用正常前倾的子宫演示装节育环操作。上面的小视窗可以看见节育环的安放。一定要用少量温和的肥皂水清洗宫颈如同真人放置节育环时要消毒一样。

内窥镜及腹腔镜

1. 模型腹部具有小切口，需配合真实的操作器械进行腹腔操作，可以模拟输卵管结扎、子宫息肉切除等。
2. 使用带有通路的宫颈和子宫，可以训练内窥镜使用方法和相关操作。

模型的保养

- 模型皮肤质地精细，操作时，要同对待真人一样仔细认真。
- 操作时要用仪器或戴上手套，并内故意写水溶性的润滑油。
- 操作完毕，要用温和的肥皂水清洗模型。不可以用腐蚀强的清洗剂。用提供的婴儿粉抹干，有利于模型。

- 模型存放在便携袋中。
- 油笔印，墨水等会造成痕迹。
- 不要用印刷品包裹模型。
- 不可以用碘溶剂。