

鼻胃管和气管造口护理模型

产品型号：W99834



鼻胃管和气管造口护理模型为学生进行鼻胃管和气管造口的插管、护理等技术提供了真实的体验。该训练器还可以进行气管内插管，以及口、鼻和咽喉的许多其他手术。



组件清单

- 鼻胃管和气管造口护理模型
- 125 毫升喷射瓶
- 夹子
- 润滑剂

设置训练器

1. 取下模型背板。
2. 从脉冲管上拆下挤压球。从躯干右侧上面的孔中取出塑料连接器。重新连接挤压球。
3. 从下面的孔中取出胃管。连接管夹。
4. 重新安装背板。

鼻胃管训练

1. 在插入之前，总是使用大量润滑剂润滑导管。建议使用 6 号鼻胃管。
2. 在模拟鼻饲过程时，建议使用清水。
3. 在给予液体之前，确保将胃部排液管夹紧。
4. 一旦液体进入胃中，它们就可以通过控制管道和夹子抽出或排出。
5. 为了防止损坏管道，在存放模型前，务必完全打开排液夹，待模型管路彻底干燥。
6. 在存放模型之前，总是要完全排空胃并进行干燥。这个过程可以通过取下模型背板并将胃袋与食道断开。（见图 1）

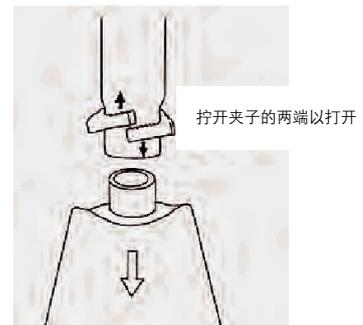


图 1

气管造口插管训练



1. 气管造口插管在插入之前应涂上大量的润滑剂。只能使用 6 French 气管导管（LF01170U 单独出售）。
2. 可对气管进行抽吸。为了增加真实感，将增稠剂与水混合，以获得模拟气管分泌物。之后一定要彻底冲洗并排空呼吸道。

气管内插管培训

模型还可以进行小型成人气管内插管。建议使用尺寸为 6 毫米的气管内插管。在开始任何操作之前，始终使用提供的喷雾来润滑气道和管子。

模型护理

1. 不要让皮肤接触任何印刷材料，包括标记笔和圆珠笔；油墨会被吸收，导致永久性污渍。
2. 脏污可以用温肥皂水和干净的布擦去。对于顽固性脏污，请使用清洁剂（LF09919U，单独出售）。
3. 存放前，确保模型的所有部件都是清洁干燥的。

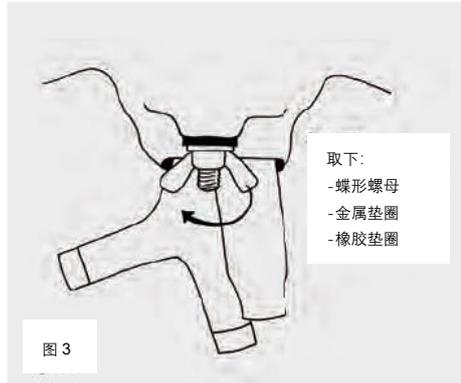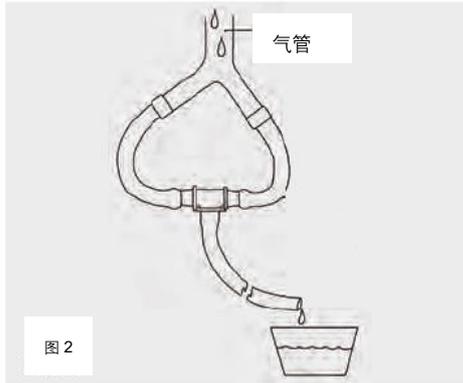

4. 若要清洁呼吸道，请取下背板并断开肺部，用排液管接替。（见**图2**）。调整模型，将空盆放入水槽或水池中。彻底冲洗呼吸道；提供的喷射瓶以及柔软韧性的刷子对难以清洁的区域。在存放模型之前，使所有的组件完全干燥。
5. 大多数清洁都可以在训练器完全组装的情况下完成。如果您确实想取下头部：
 - a. 取下背板并断开胃和肺。
 - b. 从内侧取下将颈部固定在身体上的蝶形螺母和垫圈。（见**图3**）
 - c. 拆下整个头部组件。
 - d. 如需更换头部，请按与这些步骤相反的顺序进行，将咽喉穿过大孔，将螺栓穿过小孔。将食管略微放置在气管的一侧。
 - e. 按此顺序更换橡胶垫圈、金属垫圈和蝶形螺母，并牢牢地固定好。重新连接肺部和胃部。
6. 将模型暴露在极热的环境下可能会导致躯干变形。应尽可能地避免长时间地将模型放置在炎热的环境中，例如汽车后备箱。如果确实发生了变形，应温和加热，使躯干恢复至原状。